

## Empfehlung

### Verwendbare Desinfektionsmittel für NIHON KOHDEN Medizinprodukte (Geräte und Zubehör)

Zusätzlich zu den in den in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen angegebenen Wirkstoffen für die Desinfektion von Medizinprodukten empfehlen wir nachfolgende handelsübliche Desinfektionsmittel:

<b>Handelsname</b>	<b>Wirkstoff</b>	<b>Hersteller</b>
Incidin Plus	Glucoprotamin	Ecolab
Microbac forte	QAV	Bode / Hartmann
Terralin protect	QAV + aromatische Alkohole	Schülke
Mikrozid sensitive wipes	QAV	Schülke
Mikrozid sensitive liquid	QAV	Schülke

Hinweis: Die aufgeführten Produkte sind VAH gelistet.

Bitte beachten Sie unbedingt die in der Gebrauchsanweisung zum Desinfektionsmittel angegebenen Anwendungshinweise. Bei Unsicherheiten zur Dosierung und Anwendung halten Sie vor Gebrauch bitte Rücksprache mit den zuständigen Hygienefachkräften in Ihrer medizinischen Einrichtung und/oder dem Hersteller des Desinfektionsmittels.

Zum Auftragen von flüssigen Desinfektionsmitteln empfehlen wir die Verwendung von mit Desinfektion vorgetränkten Fertigtüchern. Wenn die Tücher vor Ort getränkt werden, bitte achten Sie darauf, dass es sich um oberflächenschonende Tüchern handelt und dass diese Tücher leicht mit dem Desinfektionsmittel angefeuchtet werden und nicht tropfen.

Sollten in Ihrer medizinischen Einrichtung andere als die oben angegebenen Desinfektionsmittel verwendet werden, dann achten Sie bitte darauf, dass die für die Desinfektion von NIHON KOHDEN Medizinprodukten alkohol- und chlorfrei sind. Prinzipiell geeignet sind die Wirkstoffe Glucoprotamin oder Quaternäre Ammoniumverbindungen (QAV).

Bitte beachten Sie außerdem die Angaben in den Gebrauchsanweisungen der entsprechenden Medizinprodukte.

Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

NIHON KOHDEN DEUTSCHLAND GmbH  
Raiffeisenstrasse 10  
61191 Rosbach v.d.H.

E-Mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)  
Telefon: 06003 / 8270

Diese Empfehlung ist bis zum 31.12.2020 gültig.